


IP床位分机

—— 产品安装使用说明 ——




LonBon 来邦

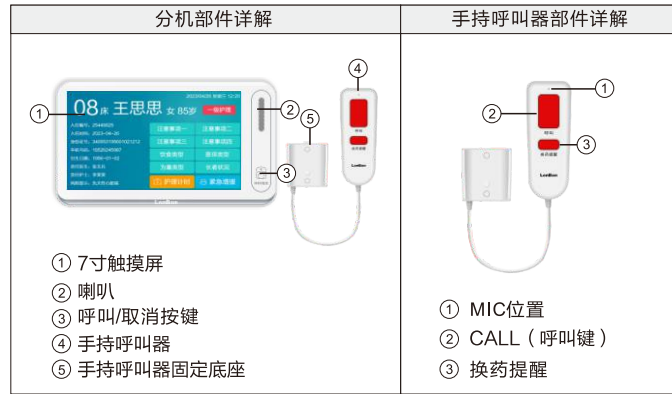

一、安装调试:

1、产品安装图:

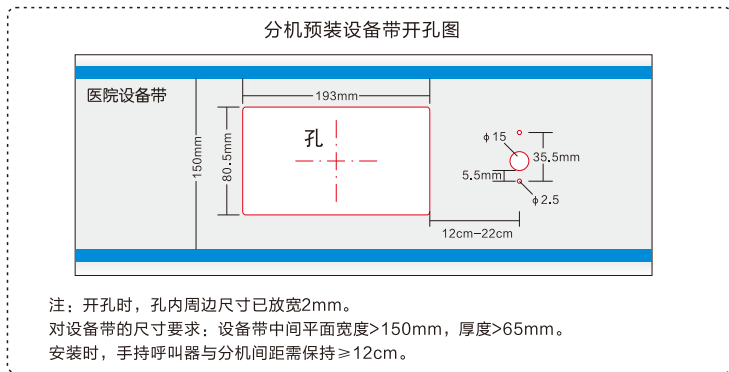


2、背面接口说明:

(1) 网络接口: 将配送的“网络水晶头转引线”插入到网口接口(注意方向),再连接网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内)。

(2) 电源接口: 将配送的“电源红黑引线”插入到电源接口(注意方向),红线、黑线分别于另购电源箱的其中1对+24V、GND接线柱对应连接,给分机供电(供电范围12~24V)。

(3) 外部接口: (外部接口设备必须先接入再通电,拔掉时必须先断电)

① 外接门灯(HBW-ME): 将门灯电源(白)、门灯控制(棕)、地线(黑)与门灯的“红”“白”“黑”三芯线相连。

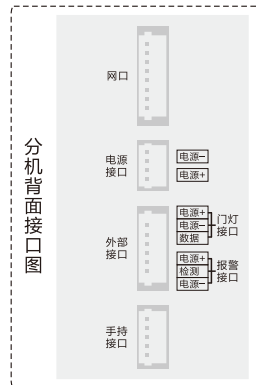

- ② 外接门灯(NBW-ME5): 将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。
- ③ 外接报警按钮(ANW3): 将接报警按钮的“电源-、检测”2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上,无需分极性。
- ④ 外接报警按钮(ANW4): 将接报警按钮的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接到报警按钮的红、黑、白3芯线上。
- ⑤ 外接报警按钮(ANW7/ANW7-B): 将门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到报警按钮的红、白、黑3芯线上。

二、设置调试:

- 1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统功能设置。
- 2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入,密码为序列号后四位,可在“系统信息”中查看序列号信息。
- 3、输入序列号后4位进入基本设置使用手动设置网络时,输入本机编号(包括:所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址

例如:

“服务器IP”: 192.168.1.169 (输入与主机同一服务器)

“IP地址”: 192.168.1.22

“子网掩码”: 255.255.255.0

“默认网关”: 192.168.1.1

最后按“保存”键,分机将重新启动。设置完成,分机可正常呼叫对讲。

- 4、恢复出厂默认值: 将恢复成本机出厂时的默认设置。
- 5、安装使用说明: 可供查看本机的简要说明。
- 6、系统信息: 可查看分机的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息)。

三、使用说明:

- 1、**一键呼叫:** 可通过手持呼叫器、或触摸按键向主机发起呼叫请求,主机接听后即可与分机双向对讲。
- 2、**紧急增援:** 级别优先于普通呼叫,按下“紧急增援”键后主机将播报“xx床紧急增援”。
- 3、**护理计时:** 第一次点击开始计时、再次点击结束计时,计时过程会存储在主机或服务器端查看,用于护士护理工作的记录。
- 4、**IPC联动:** 支持绑定网络摄像机,护士可通过主机对房间内内进行视频监护。
- 5、**夜晚模式:** 支持夜晚模式,根据主机设置的夜间模式关屏休眠。
- 6、**在线监测:** 可监测设备在线状态,出现掉线或故障连接不通时,自动提醒至照护站主机。
- 7、**内置定位标:** 提供其它穿戴设备实现精准定位使用。