

无线对讲分机

— 安装调试使用说明 —



LonBon 来邦


一、安装调试

安装在长者床头上方，距地约1.3米。支持一键呼叫照护站监护主机，主机接警可与之进行语音通话，同时分机支持向监护主机发起请求增援功能。到达和完成按键可用于记录报警处理流程或护理记录。

无线对讲分机内置定位信标，覆盖半径5-7米，长者在此覆盖区域用监护手表报警时，将会自动携带床位号信息发送至监护主机。



1、产品安装图

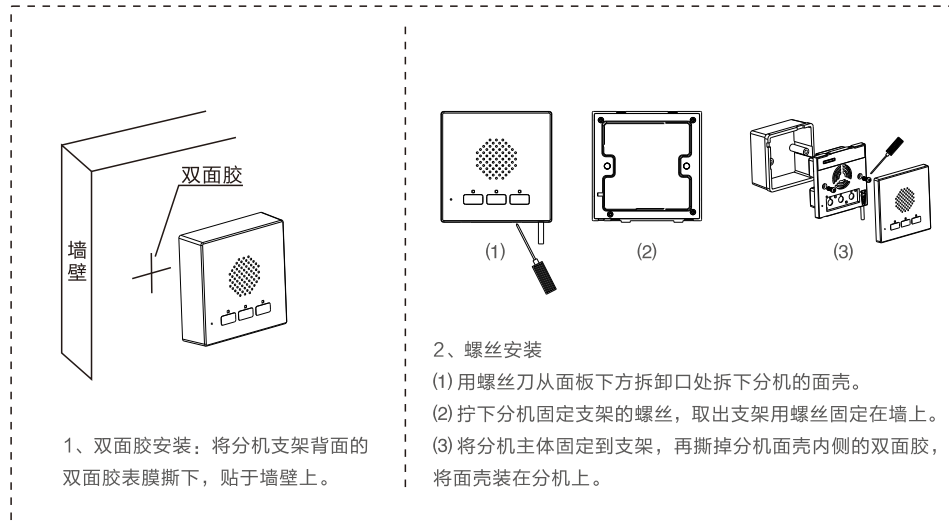

二、使用说明

1、接线说明

无线对讲分机的接口含：集中供电接口、外接门灯接口、外接按钮接口。接线说明如下：

(1) 集中供电接口：将标配的嵌入式电源输出端，红线接正极，黑线接负极。(说明:集中供电电压12V-24V)

(2) 外接按钮接口：

① 外接ANW3按钮：将分机外接按钮接口的白色线和黑色线，接在ANW3洗手间按钮的2p线上(不分极性)。

② 外接ANW4按钮：将分机外接按钮接口的红色(电源)、白色(信号)、黑色(地线)，对应ANW4按钮的红色(电源)、白色(信号)、黑色(地线)进行接线，颜色一一对应。

(3) 外接门灯接口：将外接门灯接口的黄色(电源)、棕色(门灯)、黑色(地线)，对应门灯(如：NBW-ME5)的红色(电源)、白色(门灯信号)、黑色(地线)进行接线，颜色一一对应。

2、调试说明

无线对讲分机正常工作后，打开“机构App”，进入“设备绑定-房间设备绑定”，在“床位设备”里面找到“床头无线对讲分机”，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该无线对讲分机，点击App上“绑定”按钮，根据App上提示完成绑定。(详情查看机构App)

3、使用说明

(1) 一键呼叫：按一下“呼叫”键，可一键呼叫监护主机。

(2) 护理记录：按一下“到达”键，分机语音提示“到达现场”，监护主机显示“正在护理中”，再按下“完成”键，分机语音提示“完成护理”，监护主机结束护理状态，并生成护理记录，可在主机的“系统设置-护理记录”中查看。

(3) 护理流程管控：分机正在呼叫监护主机时，按一下“到达”键，分机呼叫状态解除，监护主机显示分机“正在护理中”，再按一下“完成”键，分机语音提示“完成护理”，监护主机结束护理状态，并生成护理记录。

(4) 紧急增援：按一下“增援”键，可发送紧急增援请求到监护主机。

三、技术参数

| | | | |
|--------|------------|------------|--------------|
| 通讯方式： | 4G Cat.1 | 扬声器阻抗功率： | 8Ω, 1.5W |
| 音频采样率： | 16K~48K Hz | MIC 输入灵敏度： | 10mV |
| 音频模式： | 16位立体声CD音质 | 广播音频格式： | MP3、WAV |
| 音频码流： | 16Kb~192Kb | 输出频率： | 20 Hz~20K Hz |
| 功耗： | < 5W | 谐波失真： | < 0.5% |
| 面板尺寸： | 86x86x9mm | 信噪比： | ≥ 90dB |
| 手持供电： | 电池 | 工作温度： | -10℃ ~ +60℃ |
| 分机供电： | Type-C供电 | 工作湿度： | 10% ~ 90% |