

护工手表

— 安装调试使用说明 —



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试

护工佩戴，支持接警处警、语音播报、信息显示、请求增援、护理到达，监护主机可与护工手表双向通话等功能。采用防水设计，磁吸式充电。



二、使用说明

1、设备使用

- (1) 开 机：长按2秒SOS按键，手表开机。
- (2) 紧急增援：在待机状态下，长按2秒SOS按键可进行紧急增援。
- (3) 界面切换：短按SOS按键可切换界面。
- (4) 接警处警：当收到该护工所管理的房间内设备报警时，手表将自动收到该报警信息，手表伴有振动和语音播报，界面也同步显示该报警信息。长按SOS按键2秒，将由该护工处理此条报警，当护工前往报警的房间，检测到护工手表后自动处理该条报警。
- (5) 语音通话：主机可在护工手表功能界面与之语音通话。
- (6) 磁吸充电：将充电线磁吸在手表背部金属点上，吸附后自动充电。
- (7) 关 机：在6秒内，连续按下SOS按键15次，手表关机。
- (8) 防水设计：手表具备IP67防尘防水等级,即使冲水也能正常使用。

2、手表绑定及房间绑定

(1) 手表绑定

打开“机构养老App”，在“设备安装-设备绑定-员工设备绑定”界面，点击“添加员工设备”输入员工姓名后，扫描手表二维码，点击确定后将自动绑定并保存。完成绑定后手表二维码界面会显示绑定护工的姓名。

(2) 房间绑定

在“机构养老APP”中，在“运维管理-员工设备设置”界面，点击需要设置的护工，先选择主机号，再选择需要管理的房间，支持单选或多选，点击“保存”即可。

3、注意事项

消费者若使用电源适配器充电，则应购买使用满足相应安全标准要求的电源适配器或者是获得CCC认证的电源适配器。

三、技术参数

产品名称:	护工手表	电池类型:	锂电池 (570mAH)
工作电压:	4.2V	充电方式:	磁吸式充电
工作湿度:	10%~99%	工作温度:	0℃~60℃
通信方式:	4G Cat.1	显示屏尺寸:	0.95英寸
防水等级:	IP67	尺寸:	50.5 × 38.5 × 17mm(不含表带)
产品材质:	ABS+PC	定位方式:	定位信标、WiFi等